

Jak správně navěsit vitalimetr



Správně

**Mám to
správně?**



**Na straně
krku**



Špatně

Řešení:
Otočit zpět do výchozí
polohy a povolit popruh.

**Přes
ucho**



Špatně

Řešení:
Vrátit zpět na krk a
dotáhnout popruh.

**Málo dotažený
popruh**



Špatně

Řešení:
Dotáhnout popruh tak, aby
mezi popruhem a hřbetem
krávy byly 4 cm (2–3 prsty).

**Čísla moc
vysoko**



Špatně

Řešení:
Umístění čísel by mělo být
cca 10 cm nad vitalimetrem.
POZOR na směr čtení.

**Volný konec
popruhu**



Špatně

Řešení:
Volný konec popruhu
upevníme do navlečené
spony. Tím zajistíme
nechtěné samovolné
povolení popruhu.



Navěšování vitalimetru - postup

Krok 1



Krok 2



Před nasazením si připravte délku popruhu, dle odhadu velikosti krku krávy (jalovice ≤ 90 cm, H120 cm, C130 cm).

Pozn.: Popruh je vitalimetrem pouze protažen, nijak nezajištěn.

Možné jsou 2 způsoby zapnutí popruhu:

- a) volný konec ven (směr od zvířete)
- b) volný konec dovnitř (směr ke zvířeti).

Popruh s vitalimetrem umísťujte pouze na krk zvířete. Na krk zafixované krávy navlečte vitalimetr směrem nahoru resp. od krku ke hřbetu. Dotáhněte popruh tak, aby mezi popruhem a hřbetem krávy byly zhruba 4 cm (2-3 prsty).

Krok 3



Krok 4



Volný konec popruhu upevněte do navlečené nerezové spony. Tím popruh zajistíte proti samovolnému povolení a zabráníte nesprávné detekci pohybu krav.

Po správném nasazení a dotažení popruhu vitalimetru proveďte finální kontrolu vzhledu a funkčnosti.



farmtec.cz/vitalimetry-fa-22