

Jak správně navěsit vitalimetr FA 22



Správně

Mám to
správně?



Na straně
krku

Přes
ucho

Málo dotažený
popruh

Čísla moc
vysoko

Volný konec
popruhu



Špatně

Řešení:
Otočit zpět do výchozí
polohy a povolit popruh.



Špatně

Řešení:
Vrátit zpět na krk a
dotažnout popruh.



Špatně

Řešení:
Dotáhnout popruh tak, aby
mezi popruhem a hřbetem
krávy byly 4 cm (2–3 prsty).



Špatně

Řešení:
Umístění čísel by mělo být
cca 10 cm nad vitalimetrem.
POZOR na směr čtení.



Špatně

Řešení:
Volný konec popruhu
upevníme do navlečené
spony. Tím zajistíme
nechtěné samovolné
povolení popruhu.



Navěšování vitalimetru FA 22 - postup

Krok 1



Krok 2



Před nasazením si připravte délku popruhu, dle odhadu velikosti krku krávy (jalovice ≤ 90 cm, H120 cm, C130 cm).

Pozn.: Popruh je vitalimetrem pouze protažen, nijak nezajištěn.

Možné jsou 2 způsoby zapnutí popruhu:

- a) volný konec ven (směr od zvířete)
- b) volný konec dovnitř (směr ke zvířeti).

Popruh s vitalimetrem FA 22 umísťujete pouze na krk zvířete. Na krk zafixované krávy navlečte vitalimetr FA 22 směrem nahoru resp. od krku ke hřbetu. Dotáhněte popruh tak, aby mezi popruhem a hřbetem krávy byly zhruba 4 cm (2-3 prsty).

Krok 3



Volný konec popruhu upevněte do navlečené nerezové spony. Tím popruh zajistíte proti samovolnému povolení a zabráníte nesprávné detekci pohybu krav.

Krok 4



Po správném nasazení a dotažení popruhu vitalimetru FA 22 proveďte finální kontrolu vzhledu a funkčnosti.



farmtec.cz/vitalimetry-fa-22